

HARTMANN



HydroClean® plus

Aktywowany opatrunek na rany
do terapii na mokro



STERILE



PAUL HARTMANN AG D-89522 Heidenheim
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. PL-95-200 Pabianice

Wskazówki stosowania

Opis produktu

HydroClean plus to hydroaktywny opatrunek, którego główną część składową stanowi otoczony celulozą i ligniną, wyjątkowo chłonny poliakrylan (SAP). Z aktywowanym roztworem Ringera poliakrylanem (SAP) powiązana jest substancja antybakteryjna biguanid polihexametylenowy (PHMB). Warstwa kontaktowa składa się z powłoki polipropylenowej z paskami silikonowymi, która dodatkowo zapobiega sklejanemu się z raną. Po stronie nie przylegającej do rany wodoszczelna folia polipropylenowa zapobiega przedwczesnemu wysychaniu opatrunku. W ten sposób wilgoć może być oddawana do rany nawet przez trzy dni. Równocześnie folia zapobiega przemakaniu opatrunku.

Właściwości i sposób działania

Z opatrunku HydroClean plus do rany wydzielany jest roztwór Ringera przez okres nawet do trzech dni. Ponieważ opatrunek wchłania jednocześnie wydzielinę z rany, dochodzi do interaktywnego i stałego płukania zranionego miejsca. Powiązany w rdzeniu poliakrylanu (SAP) biguanid polihexametylenowy działa antybakteryjnie i hamuje wzrost zarodków we wnętrzu rany. W ten sposób zagrożenie ponownego skażenia rany zostaje zredukowane przez cały okres stosowania, nawet do trzech dni. Stosowany w opatrunku HydroClean plus poliakrylan (SAP) inaktywuje negatywnie wpływające na proces gojenia się metaloproteazy macierzy (MMP). Dzięki temu możliwa jest ponowna reaktywacja stagnującego procesu gojenia się ran chronicznych.

Wskazania

Do leczenia metodą wilgotnego opatrywania głębokich ran z ograniczoną tendencją gojenia się. HydroClean plus nadaje się w szczególności do opatrywania ran chronicznych i trudno gojących się w fazie oczyszczania. Ponadto opatrunek HydroClean plus może być stosowany do reaktywacji stagnujących procesów gojenia się, jeżeli są one wywoływane przez zbyt wysoką aktywność metaloproteaz macierzy (MMP).

Sposób wykorzystania

Kompres HydroClean plus nakłada się na ranę białą stroną, tak by zielone oznaczenie znajdowało się u góry. HydroClean plus musi stykać się z dnem rany i wychodzić nieco poza brzegi rany. Głębokie rany można poddać tamponadzie przy pomocy kompresu HydroClean plus cavity i okryć kompresem HydroClean plus. HydroClean plus należy umocować za pomocą odpowiednich materiałów. HydroClean plus należy zmienić najpóźniej po trzech dniach. W przypadku silnego wchłaniania wilgoci przez ranę, kompresy mogą jednak ulec przedwczesnemu przesuszeniu. W takich przypadkach należy wcześniej zmienić kompres HydroClean plus. W większości przypadków HydroClean plus można bez problemu usunąć z rany. Jeżeli kompres przyklei się do rany, wtedy należy nasączyć kompres przed usunięciem roztworem Ringera, a po kilku minutach będzie można usunąć go bezboleśnie.

Działania uboczne

Na początku terapii z wykorzystaniem HydroClean plus rana może ulec powiększeniu na skutek usuwania nieodwracalnie uszkodzonej tkanki. Zjawisko to może jednak być oznaką rozpoczynającego się procesu gojenia się rany. W czasie leczenia rany metodą wilgotnego opatrywania może wystąpić zaczerwienienie brzegów rany, co jest z reguły objawem polepszonoego ukrwienia na skutek postępującego procesu gojenia się rany. Podczas terapii z wykorzystaniem HydroClean plus rany mogą wykazywać skłonność do spontanicznego krwawienia. Jest to z reguły oznaka rozpoczynającego się procesu gojenia się rany. Przyczynę krwawienia należy jednak w każdym przypadku wyjaśnić indywidualnie. Terapia wykorzystaniem HydroClean plus jest sama w sobie bezbolesna, jednak otwarta rana często jest bardzo wrażliwa na bodźce mechaniczne. Często wystarczy wówczas ponowne nasączenie opatrunku roztworem, kilka godzin po jego nałożeniu (bez zmiany opatrunku), w innym przypadku wskazane jest profilaktyczne podanie odpowiednich analgetyków.

Przeciwwskazania

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników nie należy używać HydroClean plus.

Szczególne środki ostrożności

Nie wolno przycinać opatrunków HydroClean plus, ani uszkadzać ich mechanicznie w jakikolwiek inny sposób. Terapia metodą wilgotnego opatrywania ran z zastosowaniem roztworu Ringera nie powoduje maceracji żywych komórek, może jednak powodować spęcznienie warstwy rogowej naskórka na stopach, co objawia się obecnością białawego nalotu. Z tego względu zaleca się ochronę brzegów rany maścią natłuszczającą lub emulsją stanowiącą mieszaninę wody z olejem. Należy zadbać, aby na skórze nie pozostały żadne resztkowe ilości środków do pielęgnacji.

UWAGA: Każdorazowo przed przystąpieniem do leczenia ran trudno gojących się, konieczna jest kontrola stanu rany przez lekarza oraz wyjaśnienie przyczyn zaburzeń w gojeniu się rany. Leczenie rany z wykorzystaniem HydroClean plus nie może zastąpić przyczynowego leczenia zaburzeń gojenia się rany.

Szczególne wskazówki

Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30 °C. Zawartość jałowa, dopóki opakowanie jednostkowe nie uległo uszkodzeniu. Nie wyładować ponownie. Chronić przed dziećmi.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2012-07